



MM-007

PRESENTAZIONE DESCRITTIVA - TECNICA - LOGISTICA

**VOLTI MINUTI E
BAMBINI 6-12 ANNI**



MM-007

MASCHERINE MEDICHE • MONOUSO
TIPO II



FUNZIONE DEL PRODOTTO






- ☐ **Traspirante e confortevole**
- ☐ **Struttura protettiva triplo strato**
- ☐ **Adatta per pelli sensibili**
- ☐ **Senza fibra di vetro**
- ☐ **Conveniente e igienica**

DETTAGLI COSTRUTTIVI

La nostra mascherina medica di tipo chirurgico è conforme agli standard

CE
EN 14683

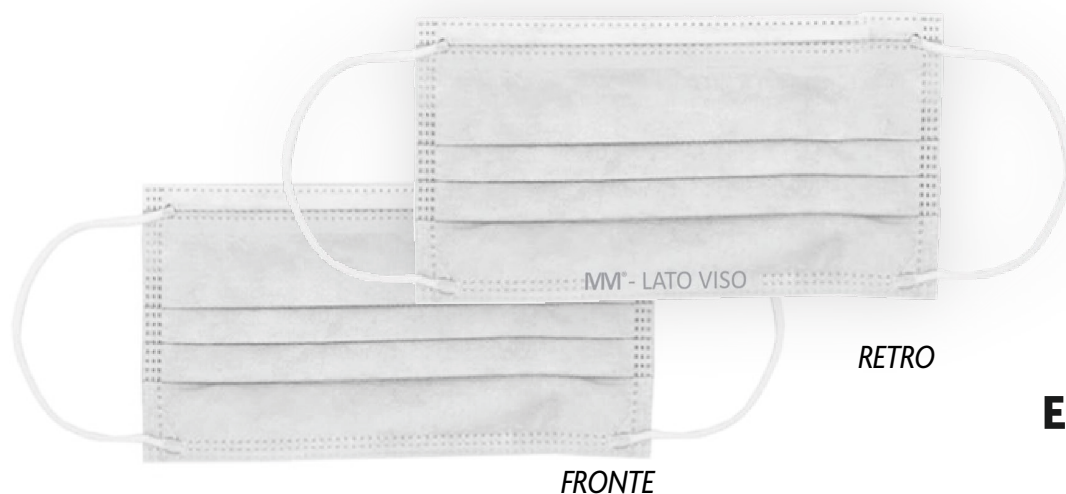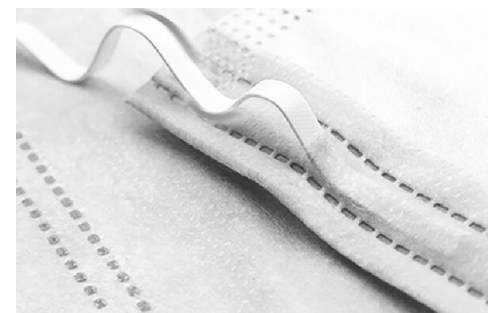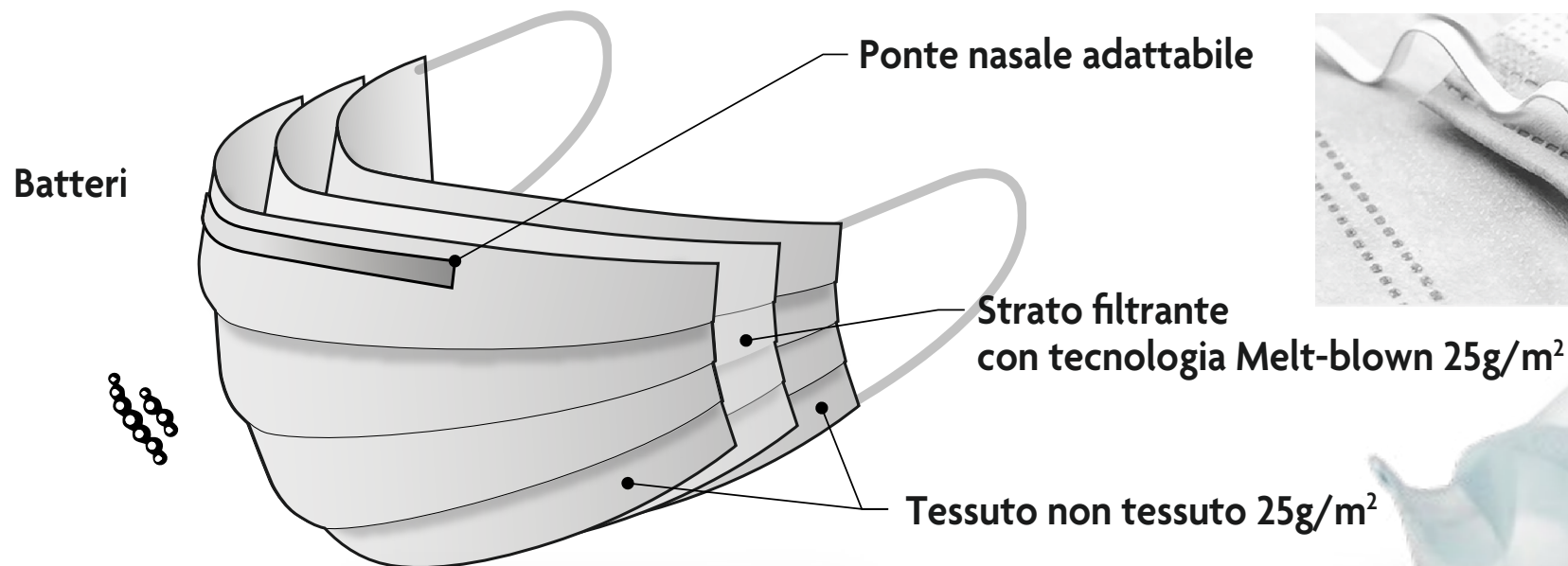

TIPO II

Efficienza di Filtrazione Batterica $\geq 98\%$

CERTIFICAZIONE



Il nostro modello di mascherina medica per volti minuti e bambini 6-12 anni è un Dispositivo Medico registrato presso il Ministero della Salute seguendo tutte le procedure standard per la corretta produzione, marcatura e distribuzione di questa tipologia di prodotto.

E' regolarmente marcato CE in rispetto di tutte le Normative e Direttive Europee.

Il numero di registrazione assegnato al Dispositivo visibile presso il sito del **Ministero della Salute** è 1964552.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Dispositivo Medico oggetto di questa presentazione è una mascherina non sterile in 3 strati, priva di lattice, anatomica, destinata a essere indossata dagli operatori sanitari durante un intervento chirurgico o altre attività in ambito sanitario o da altri utilizzatori, in altri ambienti, al fine di evitare la dispersione di agenti patogeni (quali ad esempio batteri o virus) dispersi in goccioline liquide (droplets) e aerosol che possono fuoriuscire dalla bocca e dal naso di chi le indossa. La mascherina infatti serve per evitare contaminazioni da e verso il paziente e proteggere le vie respiratorie da polvere, spray e altro materiale che viene utilizzato durante un'attività medica.

Il Dispositivo può essere impiegato nell'uso domestico soprattutto in condizioni di affollamento e in ambienti chiusi. Può essere destinato anche all'uso professionale diverso da quello medico, in particolare con riferimento ai settori food, beverage e beauty o per altri impieghi all'interno di uffici e aziende in rispetto delle specifiche normative vigenti al momento.

Ogni mascherina è unisex, in taglia unica e impacchettata in busta da 10 pezzi ciascuna contenente manuale d'uso sigillato in bustina che lo separa dai dispositivi in scatola serigrafata che contiene 5 buste. Colore della mascherina: bianco per il lato viso e bianco per il lato mondo. Sul lato viso è stampato il logo MM® e la scritta lato viso. Il dispositivo medico è di classe I monouso Tipo II.




DATI TECNICI

Strati: 3 - Materiali: strato 1 (esterno): TNT in PP 25 g/m² idrorepellente, strato 2 (intermedio): filtro melt-blown 25g/m², strato 3 (interno): TNT in PP 25g/m² - Dimensioni (mm): 145 x 95 - Peso (gr): 2,7 - Tipo in conformità alla norma UNI EN 14683:20: Tipo II - Efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%): ≥ 98 - Pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 - Pulizia Microbica (ufc/g): ≤ 30

I nostri prodotti sono testati a origine e anche in Italia. I risultati dei test rilevano un BFE medio del 99,7% (la legge prevede ≥95 per il Tipo I e ≥ 98 per il Tipo II), una pulizia microbica < 8,1 ufc/grammo (la normativa richiede ≤ 30 ufc/grammo), una traspirabilità media di 31,5 Pa/cm² (la legge richiede < 40 per le Tipo I e II).

MODO D'USO

MM[®]
MUNUS MEDICAL

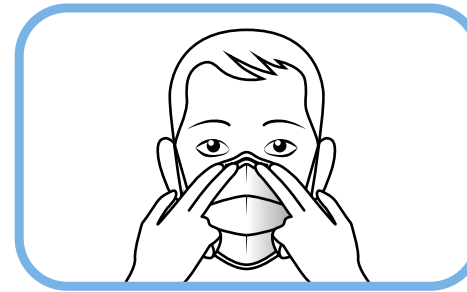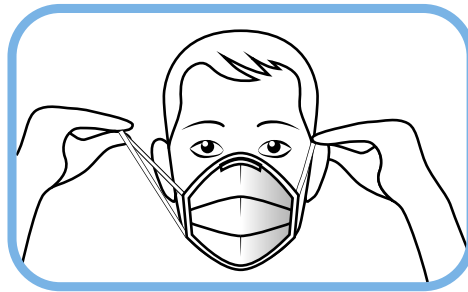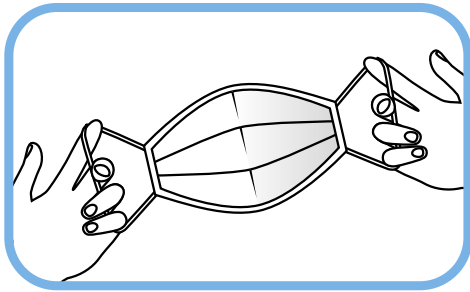

1. Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone.
2. Rimuovere la mascherina dalla confezione.
3. Visualizzare il lato interno della mascherina che riporta la scritta leggibile MM[®]- LATO VISO, con ponte nasale verso l'alto.
4. Indossare la mascherina posizionando uno alla volta gli elastici dietro le orecchie.
5. Premere con le dita il fletto di metallo su ambo i lati in modo che possa aderire alla forma del naso.
6. Tirare la parte inferiore della mascherina verso il basso per coprire completamente naso, bocca, mento.
7. Mentre si indossa e mentre si toglie la mascherina, evitare di toccare la superficie esterna con le mani e, se proprio necessario, effettuare il lavaggio delle mani dopo aver toccato la mascherina.

FORMATO BUSTE DA 10 PZ



**BUSTA CONTENENTE 10 PZ CON
MANUALE E CODICE EAN**



5 buste in scatola serigrafata



**La scatola serigrafata ha un ulteriore
codice EAN per la vendita dell'intera
confezione**



**Dimensioni scatola:
14,5 x 10 x 9 cm**

MASTER DA 300 pz



**6 scatole/cartone
Dimensioni cartone: 33 x 21 x 21 cm
Peso lordo: 1,8 Kg/Peso netto: 1,3 Kg**

MASTER DA 1000 pz



**20 scatole/cartone
Dimensioni cartone: 47 x 22 x 38,5 cm
Peso lordo: 5 Kg/Peso netto: 2,6 Kg**



MUNUS MEDICAL

è una divisione di

Munus International Srl

Via della Valtiera, 233

06135 Perugia

Tel. 0039 075 394045

www.munusinternational.it