


Mascherina Protettiva Chirurgica

Modello: Medical Face Mask-Medical Face Mask Type II

Destinazione d'uso: Dispositivo di protezione delle vie respiratorie,

Mascherina chirurgica Tipo II

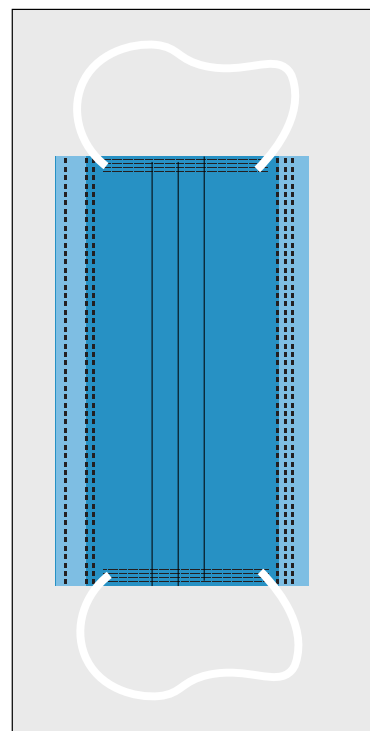

Maschera Medica monouso a tre strati: due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio in polipropilene PP. Gli strati sono uniti da una fettuccia in tessuto non tessuto termosaldata. Sul lato superiore della mascherina si trova una barretta conformabile.

Composizione chimica del prodotto:

1 Strato esterno: tessuto non tessuto spunbond in polipropilene 25g/mq;

2 Strato esterno a contatto con l'utilizzatore: tessuto non tessuto in polipropilene spunbond 25g/mq

3 Strato interno: filtro in polipropilene fuso 20g/mq BFE 99%

4 Materiale Elastici orecchie: fibre sintetiche di poliestere

Descrizione Prodotto


Colore: Azzurro

Stampa: Nessuna

Conforme a standard: EN 14683:2019+AC:2019

Imballo: Imballi sigillati d'150 pezzi, cartoni da 52*38*36 cm, 8.6 KGS , scatola da 50 pezzi.

Immagini del prodotto

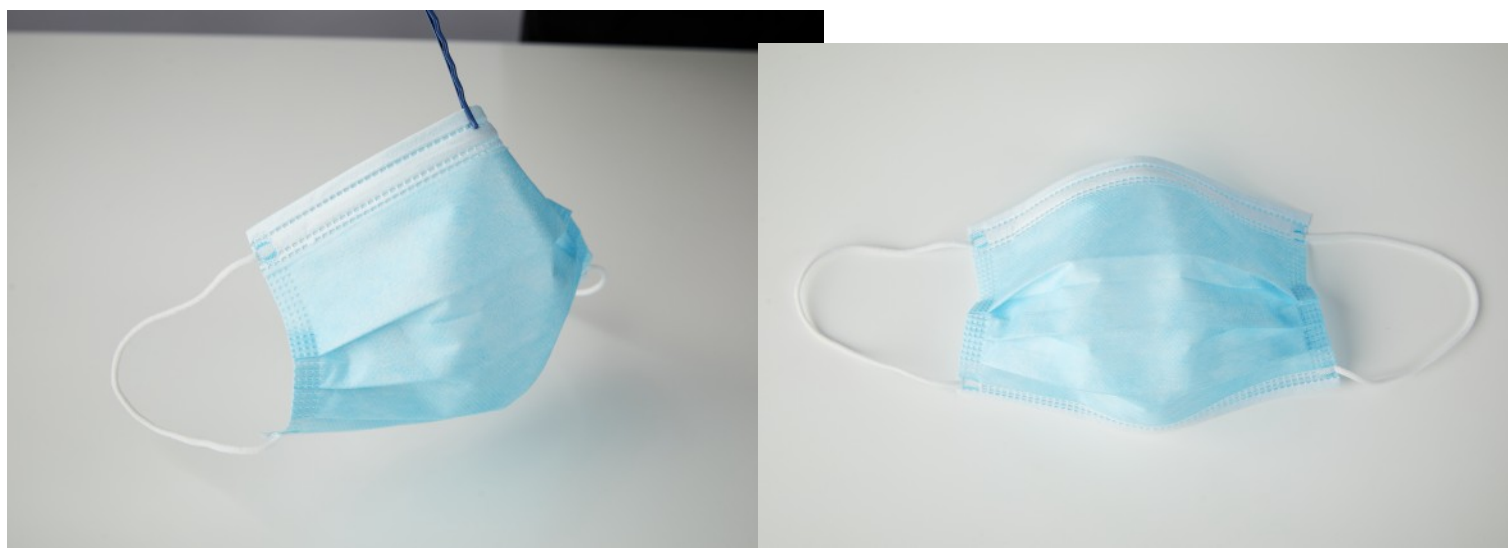

Precauzioni

1. Controllare l'integrità del dispositivo
2. Rimuovere immediatamente il dispositivo in caso di difficoltà respiratoria

Requisiti di salute e sicurezza

Il Dispositivo Medico non richiede particolari requisiti di salute in quanto per svolgere la sua funzione deve semplicemente essere indossato. Pertanto può essere utilizzato da qualsiasi individuo che debba proteggere le vie respiratorie e limitare la diffusione di infezioni e virus. Per garantire la miglior prevenzione si consiglia di sostituire il dispositivo ogni 8 ore di utilizzo.

Modalità di conservazione

1. Conservare ad una temperatura tra -20° e +30° C con una percentuale di umidità inferiore all' 80% per il prodotto fuori dalla sua confezione.
2. Scadenza: 2 anni.

Conformità legislativa

Il prodotto fabbricato in conformità ai requisiti essenziali, in base alla direttiva europea 93/42 CEE e Successive modifiche e integrazioni per dispositivi medici.

Classificazione

Dispositivo di classe I non sterile tipo II

Conformità normativa

Conforme alla norma UNI EN 14683:2019; EN ISO 10993-5:2009; EN ISO 10993-10:2009 – TIPO II

Pressione differenziale

<33 PA/cm²

Biocompatibilità

Non citotossico secondo la norma UNI ISO 10993-5

Non irritante per la cute e privo di potenziale sensibilizzante da contatto secondo la norma UNI EN ISO 10993-10

CND

T020699

RDM

1957065

LATEX FREE

sì

Prodotto

monouso

Stoccaggio

Temperatura ambiente in luogo fresco e asciutto

Smaltimento

Mediante incenerimento come rifiuto speciale secondo le indicazioni di Legge

Informazioni generali

Le mascherine facciali medicali monouso possono essere utilizzate

- da personale sanitario (medici e infermieri) per ridurre il rischio di trasmissione al paziente di microrganismi durante protocolli chirurgici, diagnostici o di assistenza ai pazienti
- da qualsiasi persona per ridurre il rischio di propagazione di agenti infettivi in particolare nelle situazioni epidemiche e pandemiche

Istruzioni d'uso

A-INDOSSARE LA MASCHERINA

1- prima di toccare una mascherina medica pulita, lavare con cura le mani con un igienizzante o con acqua e sapone. Una volta applicato il sapone sulle mani bagnate, massaggiarle una contro l'altra una ventina di secondi prima di risciacquarle.

Al termine asciugare le mani con un fazzoletto di carta pulito per poi gettarlo nella spazzatura.

2- prima di indossare la mascherina verificare che non ci siano difetti e che non siano presenti strappi sulla superficie. Se la mascherina è difettosa, buttarla.

3- prima di indossare la mascherina verificare che la superficie di colore bianca sia rivolta dalla parte della faccia, e che il lato con l'inserito preformabile sia posizionato sopra il naso

4- posizionare la mascherina sul viso, afferrandola dagli elastici, applicandone prima uno su un orecchio e poi il secondo sull'altro orecchio, seguendo il profilo del viso

B-TOGLIERE LA MASCHERINA

1- togliere la mascherina con cautela, toccando soltanto i bordi e gli anelli.

Evitare di toccare sia le superfici interne che esterne in quanto potrebbero essere contaminate

2- in ambiente sanitario gettare la mascherina appena tolta negli appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti sanitari

3- in ambiente non medico, gettare la mascherina appena tolta nei rifiuti generici dopo averla inserita in un sacchetto di plastica

4- al termine dell'operazione lavarsi le mani nello stesso modo descritto nel punto A

Vita utile del prodotto

2 anni

Avvertenze

Non riutilizzare il prodotto, potrebbe essere contaminato