



Diversey<sup>TM</sup>

# Oxivir Plus Spray

## Detergente Disinfettante per superfici ad ampio spettro d'azione – Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 21084

### Descrizione

Il detergente disinfettante Oxivir Plus Spray si basa sulla tecnologia AHP, la migliore alternativa ai disinfettanti tradizionali che fornisce una efficacia virucida, pur essendo molto delicato sulle superfici e con il minor rischio per il personale e i clienti. Il principio attivo, il perossido di idrogeno, si scompone in acqua e ossigeno, sostanze ecocompatibili, pochi minuti dopo l'uso non lasciando residui che potrebbero essere dannosi o alterare l'aspetto della superficie

### Caratteristiche principali

- Battericida, virucida, lieviticida e fungicida
- Formulazione acida brevettata a base di perossido di idrogeno
- Tempi di contatto rapidi
- Efficace detergente
- Privo di profumo

### Benefici

- Ampiamente testato in base alle norme europee ed efficace contro molteplici patogeni tra cui HIV, HBV, HCV, influenza aviaria, Coronavirus, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE e Norovirus
- Deterge e disinfetta in un unico passaggio, riducendo i tempi operativi
- Le eccellenti prestazioni di pulizia, compresa la disincrostazione e la prevenzione della formazione di calcare, elimina la necessità di una fase di pulizia preliminare
- Sicuro per gli utenti senza necessità di utilizzare DPI. Nessuna classificazione di rischio e privo di sostanze irritanti per le vie respiratorie.
- La tecnologia AHP è delicata sulle superfici prolungando la durata delle attrezzature.
- Più sicuro per l'ambiente, ma anche per gli utenti, poiché i principi attivi si scompongono in acqua e ossigeno
- Adatto per l'uso in aree ad alto rischio e tutti i settori in generale
- Ha superato i più recenti test europei per la registrazione come biocida nel campo di azione PT2 e PT4
- E' conforme ai CAM 2012 e 2016

### Modalità d'uso


1. Rimuovere lo sporco grossolano
2. Applicare la soluzione sulla superficie con panno o spugna.
3. Lasciare agire la soluzione sulla superficie e lasciare la superficie bagnata per il tempo di contatto necessario.
4. In caso di superfici a contatto con gli alimenti, risciacquare
5. Passare carta monouso sulla superficie o lasciare asciugare all'aria.

\* assicurarsi che la superficie rimanga bagnata per tutta la durata del tempo di contatto

### Dosaggi consigliati

Prodotto pronto all'uso, utilizzare tal quale

*\*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di Diversey per i dosaggi raccomandati.*

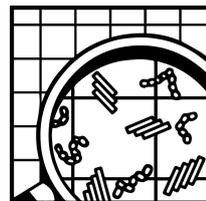

© A.I.S.E



# Oxivir Plus Spray

## Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: Liquido incolore

*I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.*

## Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza; [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Per esclusivo uso professionale.

Mantenere il prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme. Solo per utenti professionisti / specialisti.

## Compatibilità prodotto

Importante: non miscelare con altri prodotti. Reagisce con sostanze ossidabili. Non utilizzare su superfici sensibili all'acqua o agli acidi. Nelle condizioni d'uso consigliate, Oxivir Plus Spray è adatto per l'uso sulla maggior parte dei materiali comunemente incontrati.

## Dati microbiologici

L'efficacia di OXIVIR PLUS SPRAY è stata ampiamente testata. I risultati provano che OXIVIR OXIVIR PLUS SPRAY garantisce la disinfezione delle superfici, quando utilizzato seguendo le indicazioni sotto riportate: EN1276 - EN13697 - EN1650 - EN14776 - EN13624 - EN13727 - EN16777, EN16615

Battericida: 5 min. (EN1276 – EN13697 - EN13727- EN16615)

Lieviticida: 5 min. (EN1650 – EN13697 - EN13624- EN16615)

Virucida (virus incapsulati): 5 min. (EN14476-EN16777)

Fungicida: 15min. (EN1650 – EN13697-EN13624)

## Approvazioni

Oxivir Plus Spray ha ottenuto la registrazione dal Ministero della Salute Italiano come Biocida, Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. N. 21084

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2022 Diversey SpA | [www.diversey.it](https://www.diversey.it) | Tutti i diritti riservati. 28/03/2022 it-IT (K00226)